



PROTOCOLE DE REPRISE AFFICHE-03



1

Se laver les mains
à l'eau et au savon
avant toute manipulation
du masque



2

Prendre le masque
par les élastiques



3

Passer les élastiques
derrière les oreilles



4

Ajuster le masque sur le
haut du nez et en dessous
du menton



5

Pincer au niveau supérieur
du nez



6

Le masque est
correctement posé

**LA DURÉE DE PORT DOIT ÊTRE INFÉRIEURE À 4 HEURES
SUR UNE SEULE JOURNÉE**